

## 製品別、新型コロナウイルス対応 使用可能消毒剤一覧（中水準以上）

下記でご紹介している消毒剤については弊社で機器の性能には影響が無いことを確認しております。それ以外の薬剤で清拭する場合はお客様の責任で実施して頂きますようお願い申し上げます。

清拭箇所	内視鏡システム スコープ以外の製品（プロセッサ、光源等）
製品外装部	<p>&lt;使用可能な消毒剤&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 消毒用エタノールを使用可能</li> <li>■ 第四級アンモニウム塩を使用可能。</li> </ul> <p>&lt;使用不可な消毒剤&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 次亜塩素酸ナトリウム液 0.5%は使用不可 (LG コネクタが錆びる恐れがあります)</li> </ul>
内視鏡用の超音波 プローブ	<p>&lt;使用可能な消毒剤&gt;</p> <p>内視鏡スコープと同様です。</p>

### ■ 内視鏡洗浄消毒システム ESR-100/200 について

アルコールフラッシュは内視鏡管路の乾燥を目的としているため、消毒用エタノールが入手困難な場合は、シリンジを用いて管路に空気を送気するか ENDO PUSH を使用して水分の除去を行ってください。